



Verein für **medizinische Qualitätskontrolle**
Association **pour le contrôle de Qualité médical**
Associazione **per il controllo di qualità medico**

Anleitung Ringversuchsprobe H10 – Blutsenkung

Die Ringversuchsprobe muss wie eine Patientenprobe behandelt werden.

Verwenden Sie dieselben Röhrchen und das selbe Volumen wie für die Patientenprobe.

Die Probe muss vor dem Umfüllen in Ihr Röhrchen unbedingt mindestens 20 Mal von Hand über Kopf gedreht werden. Bitte beachten Sie, dass die Probe homogen ist (keine Sedimentrückstände).

Falls Sie die Probe nicht sofort messen können, bitte bei Raumtemperatur lagern (18° - 30°C). Die Probe darf nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden

Bitte kontaktieren Sie uns bei allfälligen Fragen oder Unklarheiten.

Ihr MQ Team

