



Verein für **medizinische Qualitätskontrolle**  
Association **pour le contrôle de Qualité médical**  
Associazione **per il controllo di qualità medico**

## Istruzioni per il campione H10 - Eritrosedimentazione

Il campione del controllo circolare va maneggiato come un campione clinico, utilizzando lo stesso tipo di provette e lo stesso volume.

Prima di trasferirlo nella provetta, il campione va mescolato a mano invertendolo almeno 20 volte. Accertarsi che il campione sia omogeneo, senza residui e sedimenti.

Se non è possibile misurare subito il campione, conservarlo a temperatura ambiente (18°-30°C). Non refrigerare.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti ed eventuali domande

Il team MQ

