



Verein für medizinische Qualitätskontrolle  
Association pour le contrôle de Qualité médical  
Associazione per il controllo di qualità medico

## Ringversuchsprobe G14 messen mit dem microINR Expert




Sie benötigen für den microINR die Ringversuchsprobe G14 microINR.

Diese beinhaltet:  
1 G14-Lyophilisat  
1 G14-Fläschchen mit Lösungsmittel  
1 Plastikpipette

Achtung: Die Proben müssen vor Gebrauch auf Zimmertemperatur gebracht werden.



Den gesamten Inhalt des Lösungsmittels in das Fläschchen mit dem Lyophilisat geben, Deckel schliessen und vorsichtig mischen.

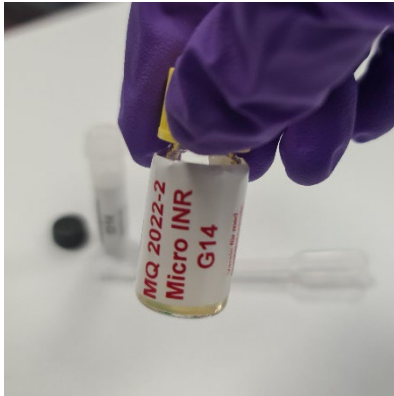

Die Probe 5 Minuten stehen lassen.

Nach diesen 5 Minuten bleibt die Probe weitere 10 Minuten stabil.



Icon Qualität auswählen.

Tippen Sie auf die Qualitätskontrolle und dann auf Test EQA, um einen Kontrolltest durchzuführen.

Öffnen Sie den Beutel und nehmen Sie den Chip aus der Verpackung. Halten Sie den Chip am gelben Teil, so dass das „microINR“-Logo nach oben zeigt



Wenn die Meldung „microINR Chip einsetzen“ angezeigt wird, setzen Sie den Chip in die vorgegebene Öffnung ein und drücken Sie ihn vollständig hinein.

Ein 80-Sekunden-Countdown läuft und die Meldung „Probe auftragen“ wird angezeigt.

Tragen Sie die Probe nun auf den Chip auf. Stellen Sie sicher, dass ein überhängender Tropfen am Ende des Testchips verbleibt.

«Probe erkannt» wird angezeigt und die Messung durchgeführt.