



## Anleitung Ringversuchsprobe messen mit Triage MeterPro



Analyse	Probe	Material und Einstellung am Gerät:	Benötigtes Probenvolumen pro Analyse
D-Dimer	G06	Patientenmodus, Plasma	250 µl
Troponin I	K41	Patientenmodus, Plasma	175 µl
BNP, NT-proBNP	K41	Patientenmodus, Plasma	250 µl

### Vorbereitung:

- Den Ringversuch nach Erhalt im Kühlschrank bei 2 – 8°C lagern
- Vor Gebrauch die Probe auf Raumtemperatur bringen
- Proben gut mischen