



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

Istruzioni dei controlli circolari con Triage MeterPro



Analisi	Campione	Materiale e configurazione del dispositivo	Volume richiesto per analisi
D-Dimeri	G06	Modo paziente, plasma	250 µl
Troponina I	K41	Modo paziente, plasma	175 µl
BNP, NT-proBNP	K41	Modo paziente, plasma	250 µl

Preparazione:

- Dopo il ricevimento, conservare il campione in frigorifero a 2 - 8°C.
- Portare il campione a temperatura ambiente prima dell'uso
- Mescolare bene i campioni