



Verein für **medizinische Qualitätskontrolle**  
Association **pour le contrôle de Qualité médical**  
Associazione **per il controllo di qualità medico**

## **Ringversuchsprobe B33 SARS CoV-2 Antigen (Schnelltest)**

Die Probe B33 erhalten Sie als Flüssigkeit (sie simuliert die Nase des Patienten). Verwenden Sie unbedingt den Abstrichtupfer, welcher in Ihrer Schnelltest-Packung enthalten ist. Gehen Sie wie folgt vor:

- öffnen Sie die Probe B33
- nehmen Sie den in der Packung enthaltenen Abstrichtupfer und halten Sie diesen solange in die Probe B33, bis die ganze Flüssigkeit aufgesaugt wurde (mindestens 30 Sekunden)
- führen Sie den Tupfer in das Röhrchen mit dem Extraktionspuffer (in der Testpackung enthalten).
- drehen Sie den Tupfer mehr als 5-mal im Extraktionspuffer und drücken Sie zum Schluss das Röhrchen zusammen.
- Sie können nun die Probe wie eine Patientenprobe auf Ihren Test auftragen. Folgen Sie den Anweisungen der Packungsbeilage Ihres Schnelltests.