



Verein für **medizinische Qualitätskontrolle**
Association **pour le contrôle de Qualité médical**
Associazione **per il controllo di qualità medico**

Essai interlaboratoire B33 Antigène du SARS CoV-2 (test rapide)

L'échantillon B33 se présente sous forme liquide (il simule le nez du patient). Utilisez impérativement l'écouvillon inclus dans votre kit de test rapide. Procédez comme suit :

- Ouvrez l'échantillon B33
- Sortez l'écouvillon de l'emballage et maintenez-le dans l'échantillon B33 jusqu'à ce que tout le liquide soit absorbé (au moins 30 secondes)
- Insérez l'écouvillon dans le tube avec le tampon d'extraction (inclus dans le kit de test).
- Tournez l'écouvillon plus de 5 fois dans le tampon d'extraction et pour finir pressez le tube.
- Vous pouvez maintenant appliquer l'échantillon sur votre test comme un échantillon de patient. Suivez les instructions de la notice d'emballage de votre test rapide.