



Verein für **medizinische Qualitätskontrolle**
Association **pour le contrôle de Qualité médical**
Associazione **per il controllo di qualità medico**

Campione B33, antigene SARS CoV-2 (test rapido)

Il campione B33 è in forma liquida e rappresenta il naso del paziente. Utilizzare quindi il tampone fornito nel kit per il test rapido. Seguire questa procedura:

- Aprire il campione B33
- Prendere in mano il tampone fornito nel kit e immergerlo nel campione finché tutto il liquido non è assorbito (almeno 30 secondi)
- Inserire il tampone nella provetta con la soluzione di estrazione, anch'essa contenuta nel kit
- Girare il tampone più di cinque volte nella soluzione e infine premere la provetta
- Caricare il campione sulla casella del test come si fa con i campioni dei pazienti. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione del test.