



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

Introduction sur l'essai interlaboratoire G17 – INR LumiraDX



Cet essai interlaboratoire liquide est prêt à l'emploi. Démarrez l'appareil et sélectionnez le mode contrôle qualité.

Sélectionnez le niveau 1 ou le niveau 2. Pour saisir le code-barres, veuillez utiliser le code à 16 chiffres qui se trouve sur votre **propre** flacon de contrôle de qualité interne.

Si vous n'avez pas de QC interne, veuillez le commander auprès de votre fournisseur.

Lorsque l'appareil est opérationnel, pipetez une goutte de liquide sur la bandelette réactive et lisez la valeur de l'INR mesurée.

Vous pouvez ignorer la zone de contrôle affichée à l'écran.

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des éclaircissements, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les meilleurs délais.



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico