



Verein für **medizinische Qualitätskontrolle**
Association **pour le contrôle de Qualité médical**
Associazione **per il controllo di qualità medico**

Istruzioni per il campione G17 – INR LumiraDX

Questo campione liquido è pronto per l'uso. Accendere lo strumento e selezionare la modalità di controllo qualità.

Selezionare il livello 1 o il livello 2. Per inserire il codice a barre, utilizzare il codice a 16 cifre stampato sul **proprio** flacone di controllo qualità interno.

Se non avete un controllo qualità interno, ordinatelo al vostro fornitore.

Quando lo strumento è pronto per la misurazione, pipettare una goccia di liquido sulla striscia reattiva e leggere il valore INR misurato.

L'area di controllo che viene visualizzata sul display si può ignorare.

Se avete domande o incertezze, non esitate a contattarci immediatamente.

Distinti saluti

Il Team MQ