




Verein für **medizinische Qualitätskontrolle**  
Association pour le **contrôle de Qualité médical**  
Associazione per il **controllo di qualità medico**


## Anleitung Ringversuchsprobe messen, G2 CoaguCheck Pro II




Öffnen Sie den Schraubverschluss des Kontrollfläschchens und entfernen Sie den Gummistopfen.

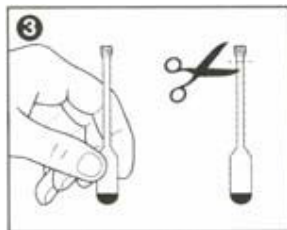

Pipette an Pipettenspitze halten und Flüssigkeit nach unten schleudern. Schneiden Sie die Pipettenspitze mit der Schere am perforierten, oberen Ende des Pipettenhalses ab. Um den Verlust von Flüssigkeit durch Drücken des Reservoirs zu vermeiden, fassen Sie die Pipette nur am Pipettenhals an.

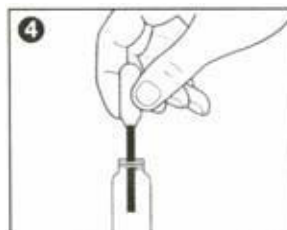


Führen sie die Pipette mit der Spitze in das Kontrollfläschchen ein. Verteilen Sie durch leichtes Drücken des Reservoirs den gesamten Pipetteninhalt über das getrocknete Kontrollplasma. Die Pipettenspitze darf das Kontrollplasma dabei nicht berühren. Entfernen Sie die Pipette aus dem Kontrollfläschchen. Werfen Sie die Pipette nicht weg, da diese im Verlauf der Durchführung zum Auftragen der Kontrolllösung benötigt wird.

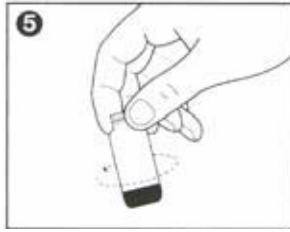


Schwenken Sie das Fläschchen 2 bis 3 mal leicht, um Klümpchenbildung an den Seitenwänden zu vermeiden.

Lassen Sie die Probe 5 Minuten stehen.

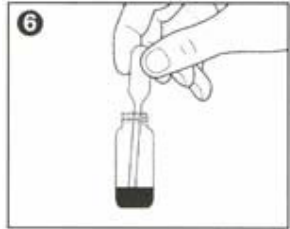

Schalten Sie das Gerät ein, und stellen Sie es auf **«Patiententest»**. Wenn das CoaguCheck Pro II Gerät Sie auffordert die Probe aufzutragen, mischen sie die Kontrolllösung nochmals durch ein bis zweimaliges Kreisen. Nehmen Sie die Pipette zur Hilfe.

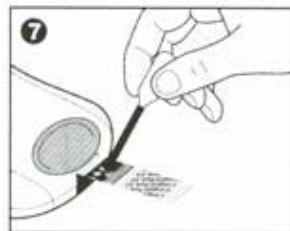

Ziehen Sie die Kontrolllösung in die Pipette auf und geben Sie einen Tropfen auf das Auftragsfeld des Teststreifens.

Die restliche Kontrolllösung ist 25 Minuten haltbar. Bei Problemen kann die Messung mit dieser Probe innerhalb von 25 Minuten wiederholt werden.