





Instructions CoaguCheck Pro II avec l'échantillon G02




Ouvrez le bouchon à vis du flacon de contrôle et retirez le bouchon en caoutchouc.

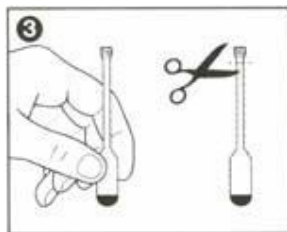

Tenez la pipette par l'embout et propulsez le liquide vers le bas.
À l'aide de ciseaux, coupez l'embout de la pipette au niveau de l'extrémité supérieure perforée du col de la pipette. Pour éviter de perdre du liquide en serrant le réservoir, tenez la pipette uniquement par le col.

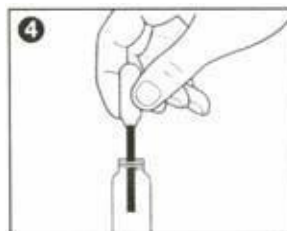


Introduisez l'embout de la pipette dans le flacon de contrôle. Répartissez tout le contenu de la pipette sur le plasma de contrôle séché en appuyant doucement sur le réservoir. L'embout de la pipette ne doit pas toucher le plasma de contrôle. Retirez la pipette du flacon de contrôle. Ne jetez pas la pipette car vous en aurez besoin pour appliquer la solution de contrôle pendant la procédure.

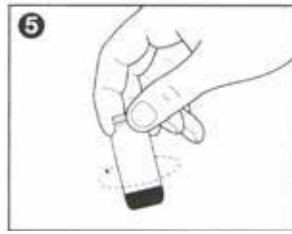


Agitez doucement le flacon 2 à 3 fois afin d'éviter la formation de grumeaux sur les parois latérales.

Laissez reposer l'échantillon pendant 5 minutes.

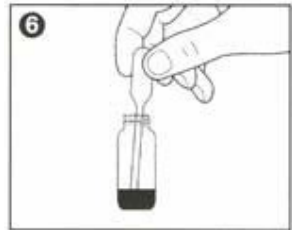

Allumez l'appareil et réglez-le sur « **test patient** ». Lorsque que le dispositif CoaguCheck Pro II vous invite à appliquer l'échantillon, mélangez à nouveau la solution de contrôle en effectuant un ou deux mouvements circulaires. Utilisez la pipette pour vous aider.

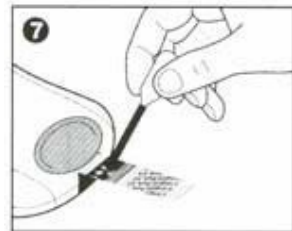

Aspirez la solution de contrôle dans la pipette et déposez une goutte sur la zone d'application de la bandelette-test.

La solution de contrôle restante est utilisable pendant 25 minutes. En cas de problème, la mesure peut être répétée avec cet échantillon dans les 25 minutes.