





## Istruzioni CoaguCheck Pro II con il campione G02




Svitare il coperchio della boccetta di controllo e togliere il tappo di gomma

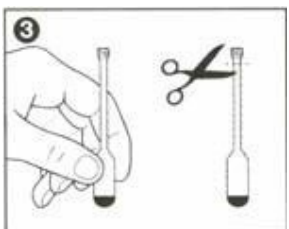


Prendere la pipetta per la punta e sbatterla per raccogliere il liquido verso il basso. Tagliare con le forbici la punta della pipetta lungo la perforazione. Per evitare di perdere liquido, non tenere la pipetta a livello del serbatoio ma lungo il collo.

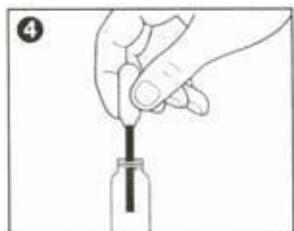


Inserire la punta della pipetta nella boccetta di controllo e distribuire tutto il contenuto della pipetta sul liofilizzato di controllo, premendo leggermente sul serbatoio. Non toccare il liofilizzato con la punta della pipetta. Estrarre la pipetta e conservarla, servirà in seguito per caricare la soluzione di controllo.

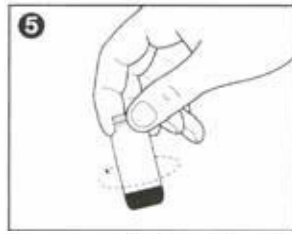

Agitare leggermente la boccetta 2 o 3 volte per evitare la formazione di grumi sulle pareti. Lasciare riposare per 5 minuti.

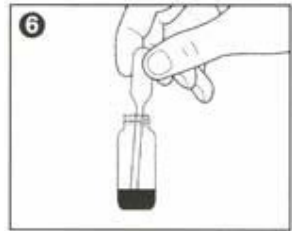

Accendere lo strumento e scegliere “**analisi paziente**”. Quando il display richiede di caricare la soluzione campione, mescolare ancora una volta la soluzione di campione nella boccetta con movimenti circolari aiutandosi con la pipetta.

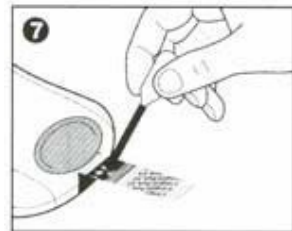

Aspirare la soluzione di controllo e caricare una goccia sul campo apposito della striscia test.

La soluzione di controllo è stabile per 25 minuti. Se necessario, il test può essere ripetuto entro 25 minuti con la stessa soluzione.