



Verein für medizinische Qualitätskontrolle  
Association pour le contrôle de Qualité médical  
Associazione per il controllo di qualità medico

## **Mesurer l'hématocrite avec l'échantillon d'essai interlaboratoire** **« H5 hématologie gaz du sang »**



- Cet échantillon doit être sorti du réfrigérateur au moins 4 heures avant la mesure.
- Retourner délicatement l'ampoule avant usage pour mélanger la solution. Tapoter l'ampoule afin que la solution se dépose de nouveau au fond.
- Mesurer l'échantillon en mode contrôle conformément aux instructions relatives au dispositif.