



Verein für **medizinische Qualitätskontrolle**
Association **pour le contrôle de Qualité medical**
Associazione **per il controllo di qualità medico**

Istruzioni per il campione I8 celiachia

Note generali

Il campione I8 celiachia dell'associazione per il controllo di qualità medico contiene sangue di un paziente e deve essere quindi maneggiato come un campione potenzialmente infettivo. Si prega di usare i guanti e di smaltire il campione come un campione clinico.

Istruzioni per il dosaggio del campione I8

Il test Simptomax è da svolgere con le stesse regole valide per un campione clinico.

- Portare campione e reagenti a temperatura ambiente
- Miscelare bene il campione di sangue nella provetta
- Prelevare 15 microlitri di campione con la pipetta Simptomax. Controllare che la pipetta sia tenuta in basso in modo che si riempi il capillare
- Portare la pipetta sul foro apposito di una striscia Simptomax e premere il palloncino
- Attendere un minuto
- Aggiungere tre gocce del reagente nel foro del campione
- Attendere 15 minuti

Lettura del risultato

L'apparizione di una o entrambe le bande rosse significa sospetta celiachia, il risultato da riportare sul protocollo è "positivo".

Se non appare nessuna banda rossa, il risultato è "negativo".

Se non appare la banda blu si tratta di un problema tecnico, il test va ripetuto.