



Verein für **medizinische Qualitätskontrolle**  
Association **pour le contrôle de Qualité medical**  
Associazione **per il controllo di qualità medico**

## Anleitung I08 Zöliakie

### Allgemeine Hinweise

Die Probe I08 Zöliakie des Vereins für medizinische Qualitätskontrolle enthält Blut eines Patienten und muss deshalb als potentiell infektiös behandelt werden.

Bitte verwenden Sie Handschuhe und entsorgen Sie die Probe wie eine Patientenprobe.

### Anleitung für die Durchführung des Tests

Sie können den Simptomax-Test mit der gleichen Vorschrift durchführen, wie Sie das mit dem Patientenblut machen.

- Das Blut im Röhrchen muss zuerst gemischt werden.
- Anschliessend können Sie mit der Simptomax-Pipette 15 Mikroliter für den Test entnehmen.  
Achten Sie darauf, dass Sie die Pipette nach unten halten, damit das Blut in die Kapillare läuft.
- Halten Sie die Pipette in die Probenöffnung eines Simptomax Streifens und drücken Sie auf den Ballon
- Warten Sie eine Minute
- Geben Sie drei Tropfen des Reagenzpuffers in die Probenöffnung
- Warten Sie 15 Min

### AbleSEN / Resultat

Falls eines oder beide rote Banden erscheinen, besteht ein Verdacht auf Zöliakie. In diesem Fall geben Sie auf dem Ringversuchsprotokoll „positiv“ an.

Falls keine rote Bande erscheint, geben Sie „negativ“ an.

Falls die blaue Bande nicht erscheint, besteht ein technisches Problem, der Test muss wiederholt werden.