



## Evaluer l'essai interlaboratoire avec Cholestech LDX

### Préparation



Vous avez besoin du matériel suivant

Appareil  
Cassette-test  
Pipette (40 ul)  
Embout de pipette  
Échantillon de l'essai interlaboratoire

Après la mise en marche de l'appareil, mesurer d'abord la cassette Optics Check avant de démarrer l'analyse.

### Régler l'appareil sur le mode «sérum»:



- Appuyez longuement sur la touche «Stop»
- Dès que la langue s'affiche, presser plusieurs fois la touche «Run», jusqu'à ce que «Sang complet» (ou «Sérum») s'affiche.
- En appuyant sur la touche "Data", positionner l'appareil sur «Sérum».
- Ensuite, appuyer sur "Stop".


### Ouverture du compartiment de la cassette




Appuyez sur «Run» pour actionner l'ouverture du compartiment de la cassette.

Après l'application de l'échantillon, la cassette-test doit être placée dans le compartiment dans les 5 secondes. Il est donc préférable d'ouvrir le compartiment de la cassette avant de pipeter.


### Pipeter l'échantillon dans la cassette

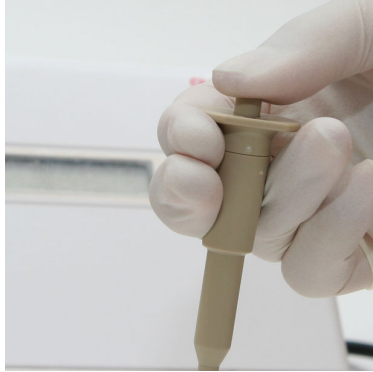

- Retirez la cassette-test de la feuille.
- Tournez et faites basculer l'échantillon pour le mélanger.
- Ouvrez le couvercle de l'échantillon
- Placez un embout jaune sur la pipette de 40ul
- Appuyez sur le bouton de la pipette et maintenez-le enfoncé.

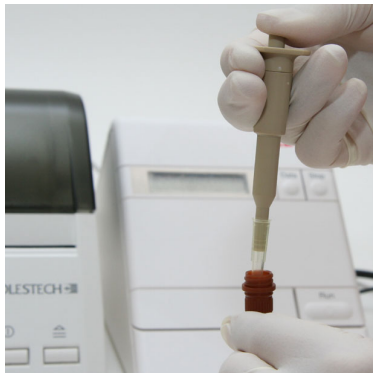

- Tenez la pipette en position verticale et plongez l'embout de quelques millimètres dans le liquide.
- Relâchez maintenant lentement le bouton de la pipette.

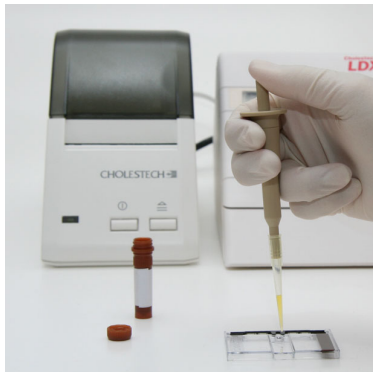

- Tenez la pipette en position verticale au-dessus de l'ouverture au centre de la cassette-test.
- Appuyez lentement sur le bouton de la pipette afin que le sérum s'écoule dans l'ouverture sans former des bulles d'air.
- Maintenez le bouton enfoncé!
- Relâchez le bouton uniquement lorsque la pipette ne se trouve plus dans l'ouverture pour l'échantillon, sinon vous reprélevez l'échantillon.

## Mesure



- Placez la cassette dans le compartiment et appuyez sur «Run»



- Collez l'étiquette dans votre journal de laboratoire.
- Inscrivez les taux sur la feuille de protocole du centre de contrôle de qualité

## Repositionner l'appareil sur sang complet



- Appuyez longuement sur la touche «Stop»
- Dès que la langue s'affiche, presser plusieurs fois la touche «Run», jusqu'à ce que «Sérum» s'affiche.
- En appuyant sur la touche «Data», repositionner l'appareil sur «Sang complet».
- Puis appuyer sur «Stop».