



Evaluer l'essai interlaboratoire avec Cholestech LDX

Test	échantillon
Cholestérol	K1
Cholestérol HDL	K1
Triglycérides	K1
Glucose	K1



Préparation



Vous avez besoin du matériel suivant

Appareil
Cassette-test
Pipette (35 ul)
Embout de pipette
Échantillon de l'essai interlaboratoire

Après la mise en marche de l'appareil,
mesurer d'abord la cassette Optics Check
avant de démarrer l'analyse.

Régler l'appareil sur le mode «sérums»:




- Appuyez longuement sur la touche «Stop»
- Dès que la langue s'affiche, presser plusieurs fois la touche «Run», jusqu'à ce que «Sang complet» (ou «Sérum») s'affiche.
- En appuyant sur la touche "Data", positionner l'appareil sur «Sérum».
- Ensuite, appuyer sur "Stop".

Ouverture du compartiment de la cassette




- Appuyez sur «Run» pour actionner l'ouverture du compartiment de la cassette.
- Après l'application de l'échantillon, la cassette-test doit être placée dans le compartiment dans les 5 secondes. Il est donc préférable d'ouvrir le compartiment de la cassette avant de pipeter.

Pipeter l'échantillon dans la cassette

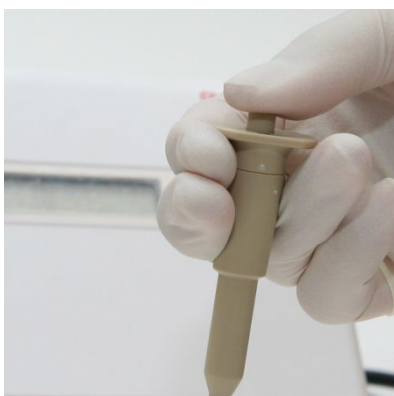

- Retirez la cassette-test de la feuille.
- Tournez et faites basculer l'échantillon pour le mélanger.
- Ouvrez le couvercle de l'échantillon
- Placez un embout jaune sur la pipette de 35ul
- Appuyez sur le bouton de la pipette et maintenez-le enfoncé.
- Tenez la pipette en position verticale et plongez l'embout de quelques millimètres dans le liquide.
- Relâchez maintenant lentement le bouton de la pipette.

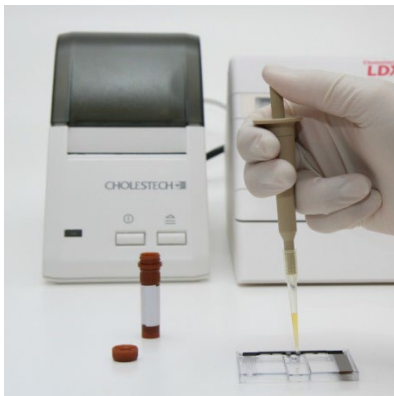

- Tenez la pipette en position verticale au-dessus de l'ouverture au centre de la cassette-test.
- Appuyez lentement sur le bouton de la pipette afin que le sérum s'écoule dans l'ouverture sans former des bulles d'air.
- Maintenez le bouton enfoncé!
- Relâchez le bouton uniquement lorsque la pipette ne se trouve plus dans l'ouverture pour l'échantillon, sinon vous reprenez l'échantillon.

Mesure



- Placez la cassette dans le compartiment et appuyez sur «Run»



- Collez l'étiquette dans votre journal de laboratoire.
- Inscrivez les taux sur la feuille de protocole du centre de contrôle de qualité

Repositionner l'appareil sur sang complet



- Appuyez longuement sur la touche «Stop»
- Dès que la langue s'affiche, presser plusieurs fois la touche «Run», jusqu'à ce que « Sérum » s'affiche.
- En appuyant sur la touche «Data», repositionner l'appareil sur «Sang complet».
- Puis appuyer sur «Stop».