



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

Analisi dei campioni dei controlli circolari con Cholestech LDX

Test	campione
Colesterolo	K1
Colesterolo HDL	K1
Trigliceridi	K1
Glicemia	K1



Preparazione



Necessita il materiale seguente

Apparecchio
Cassetta test
Pipette (35 µl)
Punte per pipette
Campione del controllo circolare

Dopo l'accensione dell'apparecchio
misurare per prima cosa la cassetta
Optics Checks prima di cominciare con le
analisi.

Commutare l'apparecchio su "Serum" Modus:



- Premere a lungo il tasto "Stop"
- Appena sull'indicatore appare la scritta, premere più volte il tasto "Run" finché sull'indicatore appare "Sangue intero" (o "Siero").
- Premendo il tasto "Data" l'apparecchio dev'essere regolato su "Siero".
- In seguito premere "Stop".


Apertura dello scomparto per la cassetta



- Premere „Run“ per aprire lo scomparto della cassetta

Dopo aver caricato il campione la cassetta va inserita nel suo scomparto entro 5 secondi. Pertanto è consigliabile aprire lo scomparto prima di cominciare a pipettare.


Pipettare la prova nella cassetta

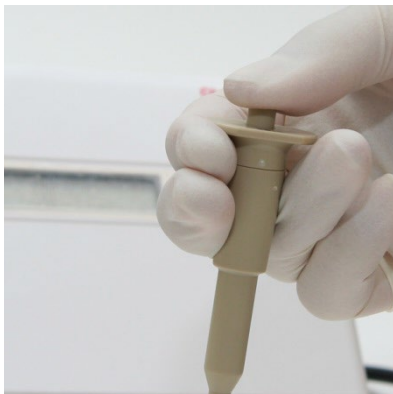

- Togliere la cassetta test dall'involucro.
- Mescolare il campione girandolo e capovolgendolo.
- Aprire il coperchio del campione
- Inserire una punta di plastica gialla sulla pipetta da 35 µl
- Premere il pulsante della pipetta e tenerlo premuto.



- Tenere la pipetta in posizione verticale e immergere la punta un paio di millimetri nel liquido. Smettere lentamente di premere il pulsante della pipetta.

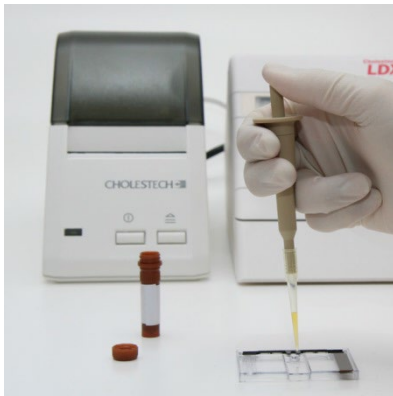

- Tenere la pipetta verticalmente sull'apertura al centro della cassetta test.
- Premere lentamente il pulsante della pipetta e lasciare scorrere il siero senza bolle d'aria nell'apertura del campione.
- Continuare a premere il pulsante!
- Lasciare il pulsante soltanto quando la pipetta non si trova più sull'apertura del campione, altrimenti riassorbe il campione nella pipetta.

Misurazione



- Inserire la cassetta e premere su "Run"



- Incollare l'etichetta nel giornale di laboratorio.
- Iscrivere i valori sul foglio di protocollo del centro dei controlli di qualità.

Commutare l'apparecchio di nuovo su sangue intero



- Premere a lungo sul tasto "Stop"
- Appena appare la scritta premere più volte sul tasto "Run", finchè sull'indicatore appare la scritta "Siero".
- Premendo il tasto "Data" l'apparecchio dev'essere di nuovo regolato su sangue intero.
- In seguito premere "Stop".