



Verein für medizinische Qualitätskontrolle  
Association pour le contrôle de Qualité médical  
Associazione per il controllo di qualità medico

## **Anleitung K48**

Für Kreatinin-Bestimmung StatSensor i/Nova



1. Teststreifen und Ringversuchsprobe (K48) mind. 30 Minuten vor Gebrauch aus dem Kühlschrank nehmen.
2. Ringversuchsprobe vor dem Öffnen 10 Mal kopfüber kippen. Den ersten Tropfen verwerfen.  
Nicht Schütteln, um eine Schaumbildung zu vermeiden.
3. Führen Sie die Messung der Probe wie gewohnt durch.
4. Tragen Sie die Werte im Ringversuchsprotokoll ein. Idealerweise tragen Sie die Werte jedoch gleich online in Ihrem Account auf [www.mqzh.ch](http://www.mqzh.ch) ein. Falls Sie die Zugangsdaten nicht wissen, fragen Sie bei uns nach, wir helfen Ihnen gerne weiter.
5. Nach der vollendeten Messung und dem Eintragen der Werte, können sie die Probe Entsorgen.