



Verein für medizinische Qualitätskontrolle  
Association pour le contrôle de Qualité médical  
Associazione per il controllo di qualità medico

## **Istruzioni K48**

Per il dosaggio della creatinina con StatSensor i/Nova



1. Estrarre dal frigorifero il campione K48 e le strisce test 30 min prima dell'uso.
2. Mescolare il campione invertendolo 10 volte prima di aprirlo. Eliminare la prima goccia. Non scuotere per evitare formazione di schiuma.
3. Eseguire l'analisi come di consueto.
4. Riportare i risultati sul protocollo, o ancora meglio direttamente online sul proprio account [www.mqzh.ch](http://www.mqzh.ch). Se non conosce i dati di accesso, il team MQ può aiutare a recuperarli.
5. Una volta eseguita l'analisi e salvati i risultati, il campione può essere smaltito.