




## K50 für Exdia TRF Plus Analyser

### Troponin I, NT-proBNP und D-Dimere

Jeder dieser Tests (D-Dimer, Troponin I, NT-proBNP) benötigt 80 Mikroliter Probenmaterial.

Wir empfehlen das benötigte Probenvolumen mit Hilfe einer Kolbenhubpipette auf die Testkassette zu pipettieren.

Falls Sie in Ihrem Labor keine geeignete Kolbenhubpipette haben, befinden sich in der Testpackung Plastikpipetten, mit denen auch ein Volumen von 80 Mikroliter pipettiert werden kann.

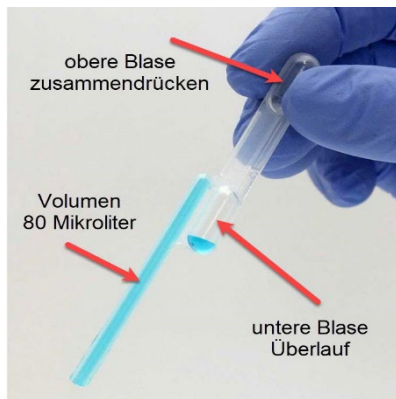

### WICHTIG

Das Plastikrohr in dem die 80 Mikroliter Probe aufgenommen werden, muss ganz gefüllt sein.

Die untere Blase ist der Überlauf, **sie muss nicht gefüllt werden!**