



Verein für medizinische Qualitätskontrolle  
Association pour le contrôle de Qualité médical  
Associazione per il controllo di qualità medico

## Anleitung Afinion

Test	Probe
CRP	I1
HbA1c	K3
Albumin und Kreatinin	U5

## Ringversuchsprobe wie Patientenprobe behandeln.

### HbA1c

- Probe muss sehr gut gemischt werden (40-50 x kippen/drehen)  
(Das Gerät zeigt sonst einen Error an)

### Kreatinin und Albumin

Wenn die Albumin-oder Kreatininkonzentration über dem Messbereich liegt, kann die Probe bis zu 4 x (1:4) mit Kochsalzlösung verdünnt werden.

Beispiel:

- 50µl Urin und 150µl NaCl mischen
- Verdünnte Probe messen
- Resultat mit 4 multiplizieren und so in den Protokollbogen eintragen

### **Wichtig:**

- Kassette nur am Griff anfassen
- Pipette in die Mitte des Röhrchens eintauchen, Pipette muss am Rand sauber sein



