



Verein für medizinische Qualitätskontrolle  
Association pour le contrôle de Qualité médical  
Associazione per il controllo di qualità medico



## Analyser l'essai interlaboratoire avec un Afinion

essai	échantillon
CRP	I1
HbA1c	K3
Créatinine/Albumine	U5
Cholestérol, HDL, Triglycérides	K30



## Traiter l'échantillon de l'essai interlaboratoire comme un échantillon de patient

### HbA1c

- L'échantillon doit être très bien mélangé (tourner 20-30 fois et renverser sur le couvercle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cellules collées au fond ou dans le couvercle).
- Veuillez analyser l'échantillon le plus rapidement possible (sang frais)

### Lipides

- Lors de la remise des résultats, veuillez à remettre la valeur HDL correcte (et non le quotient Chol/HDL).

