



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

Istruzioni Afinion

analisi	campione
CRP	I1
HbA1c	K3
Creatinina/Albumina	U5

Trattare i campioni del controllo circolare come quelli dei pazienti.

HbA1c

- Miscelare bene il campione (capovolgerlo/rigirarlo per 40-50 volte) (altrimenti l'apparecchio indica Error)

Creatinina/Albumina

Se la concentrazione di albumina o creatinina supera l'intervallo di misurazione, è possibile diluire il campione con una soluzione di sale da cucina fino a 4x (1:4).

Esempio:

- Mischiare 50µl di urina e 150µl di NaCl.
- Misurare il campione diluito.
- Moltiplicare il risultato per 4 e riportarlo nel protocollo.

Importante:

- Afferrare la cassetta solo per l'impugnatura.
- Immergere la pipetta al centro del tubicino, il bordo della pipetta deve essere pulito.



