



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

B38 Helicobacter-Urease-Test

In der Probe B38 befindet sich eine Flüssigkeit mit drei simulierten Gewebeproben.



Die Probe enthält keine lebenden Bakterien. Es wurden bei der Herstellung verschiedene Stoffe biologischen Ursprungs verwendet. Die Probe sollte deshalb wie eine potentiell infektiöse Patientenprobe behandelt und entsorgt werden.

Durchführung der Messung

Verwenden Sie eine der drei simulierten Gewebeproben wie eine Patientenprobe

Legen Sie diese gemäss Testinstruktionen in die Testkassette.

Im Falle des Lencomm-Tests können Sie das Resultat nach 60 Min (oder sobald es positiv ist) ablesen.

			
MQ B38 Probe, Pinzette und Testkassette	Gewebeprobe mit Pinzette auf das Testfeld legen	Testkassette schliessen	Nach 60 Min Resultat ablesen