



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

B38 Helicobacter-Ureasi

Il campione B38 è costituito da un liquido contenente tre campioni tissutali simulati.

Il campione non contiene batteri vivi. Varie sostanze di origine biologica sono state utilizzate nella produzione. Il campione va quindi maneggiato e smaltito come un campione clinico potenzialmente infetto.

Istruzioni

Estrarre uno dei campioni tissutali come se fosse il campione di un paziente.

Appoggiarlo nella cartuccia test secondo le istruzioni.

Nel test di Lencomm si può leggere il risultato dopo 60 min oppure non appena è positivo.

			
Campione MQ B38, pinzetta e cartuccia test	Con la pinzetta, appoggiare il campione nella cartuccia	Chiudere la cartuccia	Leggere il risultato dopo 60 min