





## HemoScreen Ringversuch Anleitung

Die Probe für den externen Ringversuch muss im **Kontrollmodus** (erkennbar durch den gelb-orangen Rahmen) durchgeführt werden. Sobald die Probe für die Messung parat ist gehen Sie folgendermassen vor:

1. Wählen Sie **“Kontrolle”** und bereiten die Ringversuchprobe für die Messung vor. Anschliessend muss die Kartusche in den HemoScreen eingefügt werden.

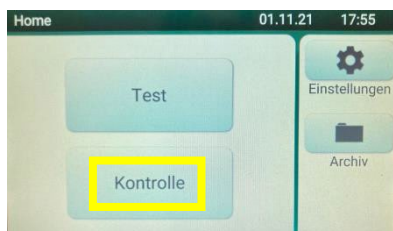


2. Sobald die Kartusche im Gerät ist, tippen Sie bitte die Taste **«EQA aus»** an. Die Anzeige wechselt dann zu **«EQA ein»**.

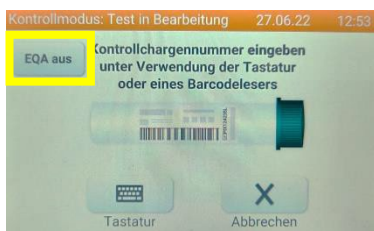


3. Durch das Anwählen der **“Tastatur”** kann anschliessend die Probenidentifikation eingegeben werden.



Tastatur anwählen

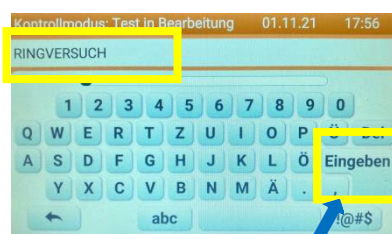

Ringversuch eingeben und bestätigen

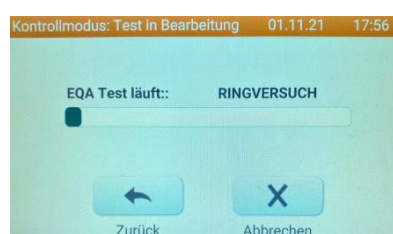

Messung läuft

4. Die Ergebnisse können nun auf das entsprechende Ringversuchformular übertragen werden.

EQA Testresultate: RINGVERSUCH		01.11.21	18:09
WBC	8.68	10 <sup>9</sup> /uL	CBC
RBC	4.81	10 <sup>9</sup> /uL	
HGB	15.7	g/dL	
HCT	38.8	%	WBC diff.
MCV	80.7	fl	
MCH	32.7	pg	Drucken
MCHC	40.6	g/dL	
RDW	15.4	%	
PLT	258	10 <sup>9</sup> /uL	
MPV	9.83	fl	