





Istruzioni per l'analisi del campione con HemoScreen

Il campione del controllo di qualità esterno va analizzato nella modalità Controllo, che si riconosce dalla cornice gialla. Una volta preparato il campione, procedere in questo modo:

1. Selezionare «Kontrolle» e preparare il campione per l'analisi. Inserire la cartuccia nello strumento.

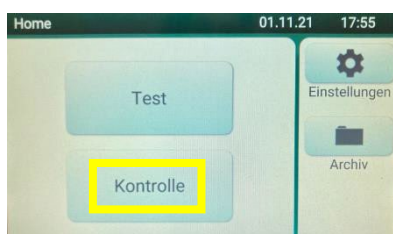


2. Appena inserita la cartuccia, cliccare il tasto «EQA aus», che cambierà in «EQA ein».

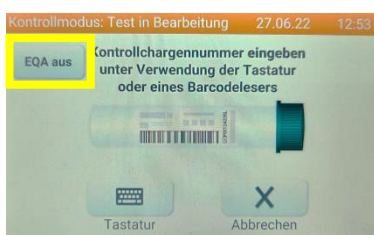


3. Attivare la tastiera («Tastatur») per potere immettere il nome del campione



Attivare la tastiera

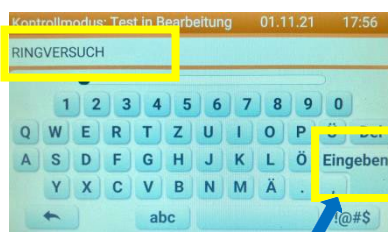

Immettere il nome e confermare

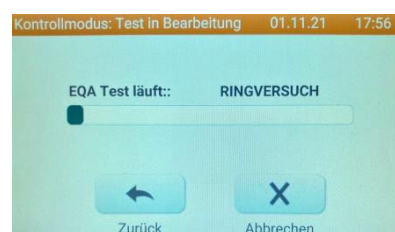

L'analisi comincia

4. Riportare i risultati sul protocollo per il controllo circolare.

EQA Testresultate: RINGVERSUCH		01.11.21	18:09
WBC	8.68	10 ³ /uL	CBC
RBC	4.81	10 ⁶ /uL	
HGB	15.7	g/dL	Home
HCT	38.8	%	
MCV	80.7	fl	WBC diff.
MCH	32.7	pg	
MCHC	40.6	g/dL	Drucken
RDW	15.4	%	
PLT	258	10 ³ /uL	
MPV	9.83	fl	