



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

Ringversuchsprobe G14 messen mit dem microINR




Sie benötigen für den microINR die Ringversuchsprobe G14 microINR.

Diese beinhaltet:
1 G14-Lyophilisat
1 G14-Fläschchen mit Lösungsmittel
1 Plastikpipette

Achtung: Die Proben müssen vor Gebrauch auf Zimmertemperatur gebracht werden.



Den gesamten Inhalt der Ca-solution in das Fläschchen mit dem Lyophilisat geben, Deckel schliessen und vorsichtig mischen.

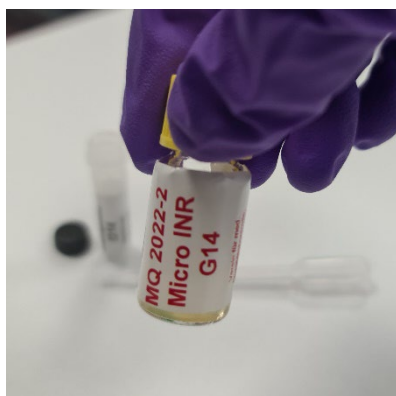


Die Probe 5 Minuten stehen lassen.

Nach diesen 5 Minuten bleibt die Probe weitere 10 Minuten stabil.



Gerät einschalten, Chip einfügen. Die Sanduhr erscheint auf dem Display.

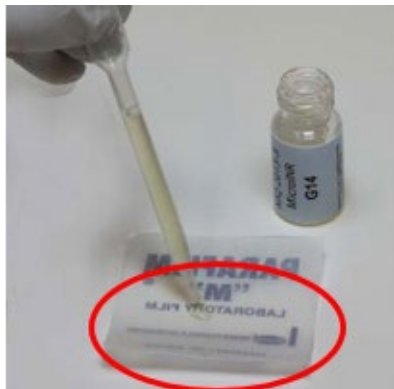

Mit der beiliegenden Plastikpipette einen Tropfen auf eine saubere Oberfläche (z. B. Parafilm) pipettieren.



Sobald das Tropfensymbol auf dem Display erscheint, kann die Probe wie eine Patientenprobe angesaugt werden.