



Verein für **medizinische Qualitätskontrolle**
Association **pour le contrôle de Qualité médical**
Associazione **per il controllo di qualità medico**


Ringversuchsprobe G14 messen mit dem microINR



Sie benötigen für den microINR die Ringversuchsprobe **G14 microINR**.

Diese beinhaltet:
1 G14-Lyophilisat
1 G14-Ampulle mit Lösungsmittel
1 Plastikpipette

Achtung: Die Proben müssen vor Gebrauch auf Zimmertemperatur gebracht werden.

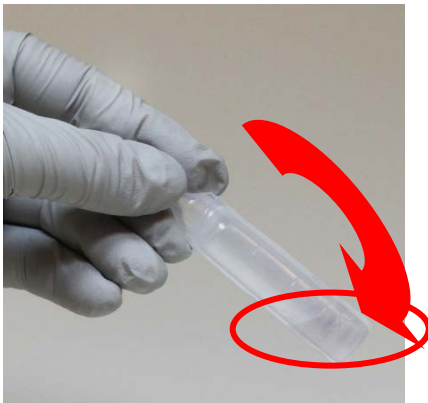

Die Flüssigkeit der Ca-solution in den unteren Teil der Ampulle schütteln.




Den gesamten Inhalt der Ca-solution in das Fläschchen mit dem Lyophilisat geben, Deckel schliessen und vorsichtig mischen.

Die Probe 5 Minuten stehen lassen.

Nach diesen 5 Minuten bleibt die Probe weitere 10 Minuten stabil.



Gerät einschalten, Chip einfügen. Die Sanduhr erscheint im Display.

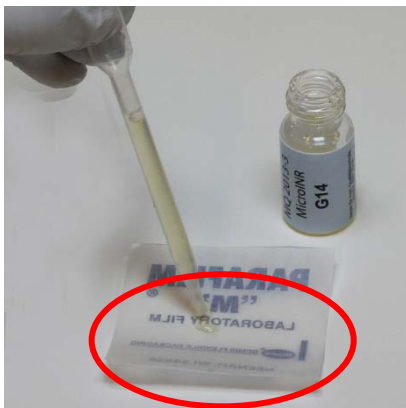

Mit der beigelegten Plastikpipette einen Tropfen auf eine saubere Oberfläche (z.B. Parafilm) pipettieren.



Beginnt das Tropfensymbol auf der Anzeige zu blinken, kann die Probe wie eine Patientenprobe angesaugt werden.