



Anleitung ABX Microsemi

Vorgehen für die Messung mit der Probe H2



Achtung: Das Röhrchen H2 darf nie direkt in die Probenhalterung des Microsemi gestellt werden.



1. Setzen Sie die Kapillarbluthalterung ein.
2. Schrauben Sie den Deckel der H2 Probe ab
3. Stellen Sie die offene H2 Probe in die Kapillarbluthalterung
4. Wählen Sie die Messung CRP+

5. Starten Sie die Analyse in dem Sie die Klappe der Probenhalterung schliessen.