



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

Istruzioni ABX Microsemi

Procedimento per il campione H2



Attenzione: la provetta H2 non va mai inserita direttamente nel portacampioni del Microsemi.



1. Inserire il supporto per i campioni di sangue capillare
2. Svitare il coperchio del campione H2
3. Inserire il campione H2 aperto nel supporto
4. Selezionare il dosaggio CRP+
5. Iniziare l'analisi chiudendo lo sportello del portacampione