



Mythic

Gerät:	Mythic
Analyse:	Hämatogramm
Probe:	H01
Material:	Vollblut



Anwendung

Vorbereitung:

- Die Probe nach Erhalt im Kühlschrank bei 2 – 8 ° lagern.
- Vor Gebrauch die Probe **30 min** auf Raumtemperatur bringen.
- Die Probe H1 gut mischen **30 bis 40 Mal kippen** (nicht auf automatischem Mischer)

Am Gerät:

1. Die Ringversuchsprobe wird **nicht** unter dem QC Modus gemessen, sondern auf dem Patientenmodus.
2. Testen Sie die Probe wie Sie eine ganz normale Patientenprobe messen würden.
3. Tragen Die die Werte im Ringversuchsprotokoll ein. Idealerweise tragen Sie die Werte jedoch gleich online in Ihrem Account auf www.mqzh.ch ein. Falls Sie die Zugangsdaten nicht wissen, fragen Sie bei uns nach, wir helfen Ihnen gerne weiter.
4. Nach der vollendeten Messung und dem Eintragen der Werte, können sie die Probe entsorgen.

Bei Fragen:

Im Zusammenhang mit der Probe: Verein für med. Qualitätskontrolle Zürich:

Tel. 044 255 34 11 oder Mail: info@MQZH.ch

Im Zusammenhang mit dem Gerät: Polymed Medical Center: Tel. 044 828 61 11 oder

Mail: info@polymed.ch