



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

Mythic

Dispositif :	Mythic
Analyse :	Hématogramme
Échantillon :	H01
Matériel:	Sang total



Utilisation

Préparation :

- Stocker l'échantillon au réfrigérateur à une température comprise entre 2 et 8 °C après réception
- Mettre l'échantillon à température ambiante pendant **30 min.** avant utilisation
- Bien mélanger l'échantillon H1 et l'**incliner 30 à 40 fois** (ne pas utiliser de mélangeur automatique)

Sur le dispositif :

1. L'échantillon d'essai interlaboratoire **n'est pas** mesuré en mode QC, mais en mode patient.
2. Testez l'échantillon comme vous le feriez pour un échantillon de patient tout à fait normal.
3. Entrez les valeurs dans l'essai interlaboratoire. Idéalement, saisissez tout de suite les valeurs en ligne dans votre compte sur www.mqzh.ch. Si vous ne connaissez pas les données d'accès, demandez-nous, nous serons heureux de vous aider.
4. Une fois la mesure terminée et les valeurs saisies, vous pouvez éliminer l'échantillon.

Pour toute question :

En lien avec l'échantillon : Verein für med. Qualitätskontrolle Zürich :

Tél. 044 255 34 11 ou par mail : info@MQZH.ch

En lien avec le dispositif : Polymed Medical Center : Tél. 044 828 61 11 ou par mail : info@polymed.ch