



## Mythic

<b>Strumento:</b>	<b>Mythic</b>
<b>Analisi:</b>	<b>Ematogramma</b>
<b>Campione:</b>	<b>H01</b>
<b>Materiale:</b>	<b>Sangue intero</b>



### Istruzioni

#### Preparazione:

- Dopo la consegna, tenere il campione in frigorifero a 2-8°
- Portare il campione a temperatura ambiente **per 30 min** prima dell'uso
- Mescolare bene invertendo **30-40 volte** (non usare miscelatori automatici)

#### Analisi:

1. Il campione del controllo circolare va analizzato con il programma dei campioni clinici, **non** con il programma QC.
2. Analizzare il campione come se fosse il campione di un paziente.
3. Riportare i risultati sul protocollo, o ancora meglio direttamente online sul proprio account [www.mqzh.ch](http://www.mqzh.ch). Se non conosce i dati di accesso, il team MQ può aiutare a recuperarli.
4. Una volta eseguita l'analisi e salvati i risultati, il campione può essere smaltito.

#### Domande?

Sul campione: Associazione per il controllo di qualità medico, tel.: 044 255 34 11; e-mail: [info@MQZH.ch](mailto:info@MQZH.ch)

Sullo strumento: Polymed Medical Center, tel.: 044 828 61 11;  
e-mail: [info@polymed.ch](mailto:info@polymed.ch)