



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

Zybio Z3 CRP

Gerät:	Z3
Analyse:	Hämatogramm + CRP
Probe:	H02
Material:	Vollblut



Anwendung

Vorbereitung:

- Die Ringversuchsprobe H2 nach Erhalt im **Kühlschrank** bei 2 – 8 °lagern.
- Die Probe vor Gebrauch **30 min** auf Raumtemperatur bringen
- Probe gut mischen; **30 bis 40 Mal kippen** (nicht auf automatischem Mischer)

Am Gerät:

1. Die Ringversuchsprobe wird **nicht** unter dem QC Modus gemessen, sondern auf dem Patientenmodus.
2. Testen Sie die Probe wie Sie eine ganz normale Patientenprobe messen würden.
3. Messen Sie das CRP gleich mit.
4. Tragen Die die Werte im Ringversuchsprotokoll. Idealerweise tragen Sie die Werte jedoch gleich online in Ihrem Account auf www.mqzh.ch ein. Falls Sie die Zugangsdaten nicht wissen, fragen Sie bei uns nach, wir helfen Ihnen gerne weiter.
5. Nach der vollendeten Messung und dem Eintragen der Werte, können Sie die Probe entsorgen.

Bei Fragen:

Im Zusammenhang mit der Probe: Verein für med. Qualitätskontrolle Zürich:

Tel. 044 255 34 11 oder Mail: info@MQZH.ch

Im Zusammenhang mit dem Gerät: Polymed Medical Center: Tel. 044 828 61 11 oder

Mail: info@polymed.ch