

Anleitung zum Ausfüllen des H3 Protokollbogens

Wenn Ihr Ausstrich defekt oder schlecht ist, schicken wir Ihnen gerne einen anderen. Rufen Sie uns so schnell wie möglich an, unser Vorrat ist begrenzt.

Leukozytendifferenzierung

Für die Unterscheidung der Stab- und Segmentkernigen Neutrophilen Granulozyten müssen Sie nach der Faden-Regel arbeiten.

Für die Bewertung nach Qualab werden die Neutrophilen (Stab + Seg), Lymphozyten/Plasmazellen und die weissen Vorstufen (Promyelozyten + Myelozyten + Metamyelozyten) automatisch zusammengezählt.

Falls Sie beispielsweise die weissen Vorstufen nicht unterscheiden können, ist es möglich diese mit einer geschweiften Klammer zusammenzufassen.

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass die Summe 100% ergibt, sonst erhalten Sie ein „nicht erfüllt“.

Morphologische Angaben

Nachdem Sie die Morphologie der Leukozyten, Thrombozyten und Erythrozyten beurteilt haben, müssen Sie für den Befund die wichtigsten Merkmale dieses Blutbildes auswählen. (max. 5 Codes)

Tragen Sie dazu die untenstehenden Codes unter "Befund" ein:

Allgemeine Codes

- 29 Normaler Befund
- 30 Unbekannte Pathologie, würde weitergeschickt
- 31 Pathologie erkannt, würde nicht weitergeschickt

Leukozytenbeurteilung

- | | |
|--|--|
| 01 Kern-Hypersegmentierung | 05 Atypische Lymphozyten vermutlich reaktiv |
| 02 Linksverschiebung | 06 Atypische Lymphozyten vermutlich neoplastisch |
| 03 Pelger-Hüet Abnormalität | 07 Auerstäbchen |
| 04 Toxische Veränd. der Neutrophilen (toxische Granulation und oder basophile Schlieren und oder Vakuolen) | 08 Andere: |

Thrombozytenbeurteilung

- | | |
|-----------------------|------------|
| 09 Riesenplättchen | 11 Andere: |
| 10 Plättchenaggregate | |

Erythrozytenbeurteilung

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 12 Mikrozyten | 20 Fragmentozyten |
| 13 Makrozyten | 21 Sphärozyten/Mikrosphärozyten |
| 14 Hypochromie | 22 Geldrollenbildung |
| 15 Polychromasie | 23 Erythrozytenagglutination |
| 16 Poikilozytose | 24 Howell-Jolly Körperchen |
| 17 Elliptozyten/Ovalozyten | 25 Basophile Punktierung |
| 18 Stomatozyten | 26 Tränenformen |
| 19 Targetzellen | 27 Andere: |

28 Parasiten (Bitte zusätzlich angeben welche)

Um die Anforderungen zu erfüllen, müssen Sie bei beiden Präparaten mindestens einen Code angeben, und die Leukozyten differenzieren.