



Anleitung ABX Microsemi

Vorgehen für die CRP Messung mit der Probe I6

Achtung: Das Röhrchen I1 CRP darf nie direkt in die Probenhalterung des Microsemi gestellt werden.

Damit Sie die Probe nicht umpipettieren müssen, haben wir einen Teil der CRP Proben in die kleineren I6 Röhrchen abgefüllt, die kompatibel mit dem Microsemi sind.



1. Setzen Sie die Kapillarbluthalterung ein.
2. Schrauben Sie den Deckel der I6 Probe ab
3. Stellen Sie die offene I6 Probe in die Kapillarbluthalterung
4. Wählen Sie die Messung CRP+
5. Starten Sie die Analyse in dem Sie die Klappe der Probenhalterung schliessen