



Verein für **medizinische Qualitätskontrolle**
Association **pour le contrôle de Qualité médical**
Associazione **per il controllo di qualità medico**

Mode d'emploi ABX Microsemi

Procédure relative au dosage de la CRP avec l'échantillon I6

Attention: le tube I1 CRP ne doit pas être placé directement dans le porte-échantillon du Microsemi.

Afin de vous éviter un nouveau pipetage, nous avons utilisé, pour une partie des échantillons CRP, des tubes I6 plus petits, qui sont compatibles avec le Microsemi.



1. Insérez le portoir de sang capillaire.
2. Dévissez le couvercle de l'échantillon I6.
3. Placez l'échantillon I6 ouvert dans le portoir de sang capillaire.
4. Choisissez le dosage CRP+.
5. Démarrez l'analyse en fermant le clapet du porte-échantillon.