



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

microINR expert / microINR

Wichtiger Hinweis:

Bitte prüfen Sie vor der Anwendung, ob Sie das Gerät **microINR** oder **microINR Expert** verwenden, da sich die Einstellungen für die externe Kontrolle je nach Modell unterscheiden.



Den gesamten Inhalt der Lösung in das Lyophilisat-Fläschchen pipettieren, mischen und 5 Minuten stehen lassen. Probe ist dann für weitere 10 Minuten stabil.

microINR expert

Analyse	Probe	Modus
INR	G14	Qualitätskontrolle -> Test EQA

microINR

Analyse	Probe	Modus
INR	G14	Patientenmodus