



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

microINR expert / microINR

Remarque importante :

Veuillez vérifier avant utilisation si vous utilisez l'appareil **microINR** ou **microINR Expert**, car les réglages relatifs au contrôle externe varient selon le modèle.



Pipetter tout le contenu de la solution dans le flacon de lyophilisat, mélanger et laisser reposer 5 minutes. L'échantillon est alors stable pendant 10 minutes supplémentaires.

microINR expert

Analyse	Échantillon	Mode
INR	G14	Contrôle de qualité -> Test EQA

microINR

Analyse	Échantillon	Mode
INR	G14	Mode patient