



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

microINR expert / microINR

Avviso importante:

Prima dell'uso, la preghiamo di verificare se sta utilizzando il dispositivo **microINR** o **microINR Expert**, poiché le impostazioni relative al controllo esterno variano a seconda del modello.



⚠ Versare l'intero contenuto della soluzione nella fiala di liofilizzato, mescolare e lasciare riposare per 5 minuti. Il campione rimane stabile per altri 10 minuti.

microINR expert

Analisi	Campione	Modalità
INR	G14	Quality control -> EQA

microINR

Analisi	Campione	Modalità
INR	G14	Analisi paziente